

【Woodcise®を安全にお使いいただくために御覧ください】

下記のいずれかに該当する方は、医師と相談の上、またはご自身の体調に合わせてご使用ください

- ・ 現在医師の治療を受けている方。
- ・ ペースメーカー等電子器具をしている方。
- ・ 悪性腫瘍のある方
- ・ 脊椎を骨折、ねんざ、肉離れ等をしている方。
- ・ 施療部位に創傷のある方。
- ・ 体温 38℃以上の方。
- ・ 安静を必要とする人や著しく体調が優れない方。
- ・ 上記以外に体に特に異常を感じている方。
- ・ 高齢者や骨が弱いと思われる方。

次の方は使用をご遠慮下さい。

- ・ 医師からマッサージを禁じられている方。
- ・ 皮下組織が炎症している方。
- ・ 骨粗そう症の方。

【Woodcise®使用上のご注意をご覧ください】

- ・使い始めは zoom サポートを利用しアドバイスを受けましょう。
- ・使い始めは心地よくても 5 分以内、数分程度から始めましょう。
- ・器具の同じ箇所での長時間の使用はひかえましょう。
- ・木枕や腰枕のご使用后 10 分は出来るだけ安静にし、その間は急激な運動は避けましょう。
- ・器具のご使用により不快な症状や激痛を感じたときは、ご使用を一時中止しましょう。
- ・直接骨部には当てないようにしましょう。
- ・乳幼児及びお子様へのご使用はひかえましょう。
- ・お子様やペットを本体の周辺で遊ばせたり、 本体の上に乗せたり、触らせたりしないようにしましょう。事故やケガの原因となります。
- ・ご使用中そのまま眠ってしまわれぬようにいたしましょう。
- ・過度のご使用は避けましょう。
- ・本来の目的以外での使用は控えましょう。